


Compo+ Diamant-Polierpaste

Diamant-Polierpaste für die Handstückpolitur

Diamond polishing paste for handpiece polishing

NUR FÜR DEN DENTALEN GEBRAUCH DURCH
FACHPERSONAL

ONLY FOR DENTAL USE BY QUALIFIED PERSONNEL

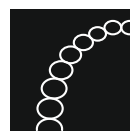

feguramed



Feguramed GmbH
Jahnstr. 2
74722 Buchen (Odenw.) Germany
Tel. +49 (0)6281/5227-0 FAX -15
www.feguramed.com

MADE IN GERMANY

Gebrauchsinformation

Deutsch

Indikation:


Vor- und Hochglanzpolitur mit dem Handstück für:

- Composite-Verblendungen
- Kunststoffzähne

Verarbeitung:

1. Polierbürsten- oder Schwabbel vor dem Benutzen bei mittlerer Umdrehungszahl an einem Holz oder Tischplatte abziehen (ohne Paste).
2. Mit Polierbürstchen Ø 16, 19 oder 22 mm (Ziegenhaar, mittelhart oder weich) mit Paste (wenig – sehr ergiebig) polieren.
Auch zu benutzen mit Filzrad (16, 19 mm) oder Filzlinse
3. Hochglanz:
Woll- oder Nesselschwabbel mit Ø 21 – 25 mm
ohne Paste.

Geschwindigkeit für Handstück: 5.000 – 25.000 rpm
4. Reinigung:
Ultraschallbad ca. 50 °C, warmes Wasser mit Netzmittel oder Abdampfen

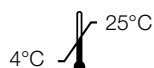

Lagerung:

Nicht über 25 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behältnisse nach Gebrauch stets verschließen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verkaufseinheit

REF

8070

Fegupol Compo+

40 g Dose

Instructions for use

English

Indication:


Pre and High-Lustre polishing with handpiece of:

- Composite veneers
- Acrylic teeth

Technique:

1. Run-in the polishing brushes or cotton buffing wheels by contacting a wooden plate or table surface at medium rotational speed.
2. Polish with micro polishing brushes Ø 16, 19 or 22 mm (goat hair, medium or soft) together with the paste. Apply paste sparsely, because it is very economical. Also possible: Felt polishing wheels (16, 19 mm) or felt lenses
3. High-lustre polishing:
Use cotton buffing wheels Ø 21 – 25 mm
without paste.

Rotational speed of handpiece: 5.000 – 25.000 rpm
4. Cleaning:
Ultrasonic unit approx. 50 °C, warm water with detergent or water steam cleaner

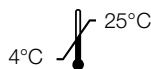

Storage:

Don't store above 25 °C. Keep away from sunlight. Keep locked up and out of reach of children. Keep container tightly closed.

Presentation:

REF

8070

Fegupol Compo+

40 g jar